




- 4 Vormontage:
 Pos. ① ② ⑩ ⑰ montieren (SM verwenden)
 Pos. ③ ④ ⑧ ⑬ ⑭ montieren (kein SM verwenden erst bei Endmontage)

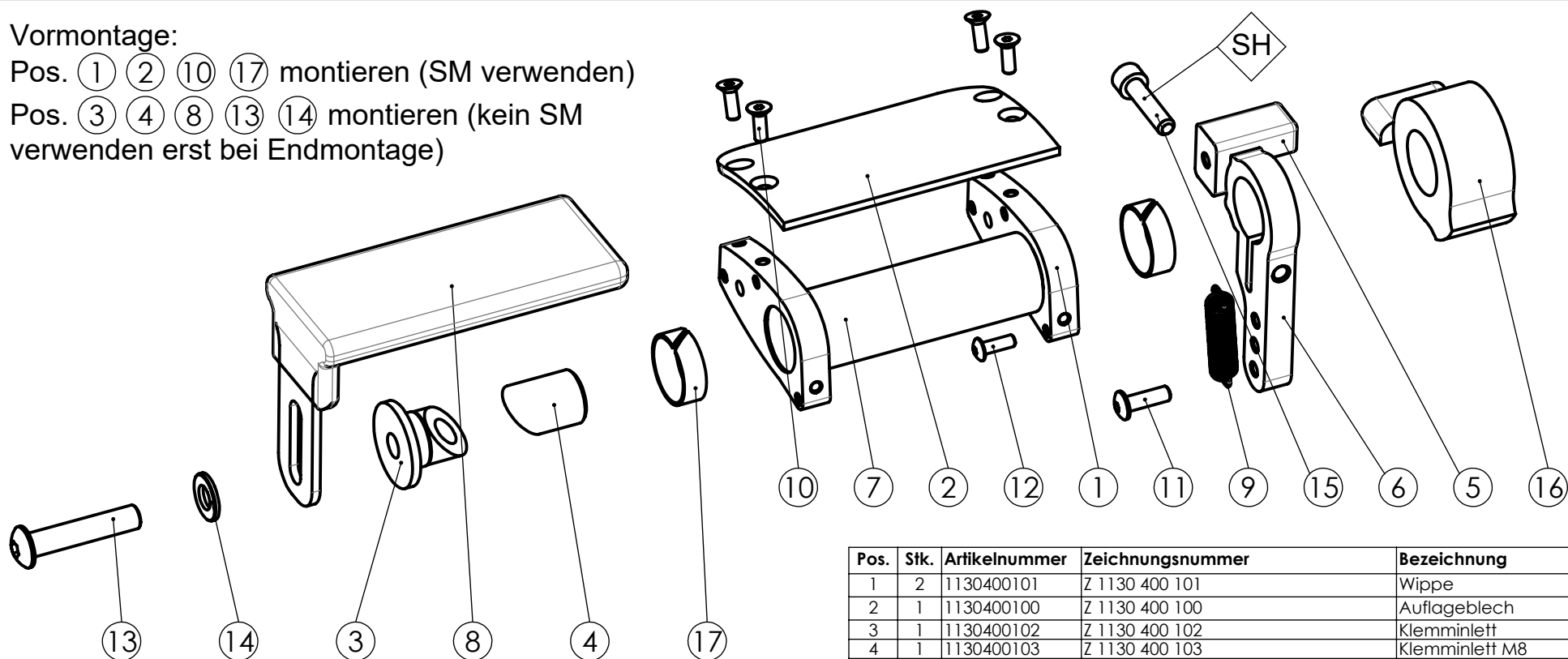

Pos.	Stk.	Artikelnummer	Zeichnungsnummer	Bezeichnung
1	2	1130400101	Z 1130 400 101	Wippe
2	1	1130400100	Z 1130 400 100	Auflageblech
3	1	1130400102	Z 1130 400 102	Klemminlett
4	1	1130400103	Z 1130 400 103	Klemminlett M8
5	1	1130400105	Z 1130 400 105	Gasfinger
6	1	1130400104	Z 1130 400 104	Gasanschlag
7	1	1130400113	Z 1130 400 113	Griffhülse Schrumpfschlauch
8	1	7110600008	Z 7110 600 008	Tetra Handstütze
9	1	1000000003	.	Zugfeder RZ-093BI
10	4	C1064204012-01	Galvanisch verzinkt	Senkschraube ISO10642-M4x12
11	1	C7380105016-06	Zink-Nickel Beschichtung	Linsenschraube ISO7380-1-M5x16
12	1	C7380104012-06	Zink-Nickel Beschichtung	Linsenschraube ISO7380-1-M4x12
13	1	C7380108040-02	Verzinkt thermisch nachbehandelt	Linsenschraube ISO7380-1-M8x40
14	1	C0709008000-01	Galvanisch verzinkt	Scheibe ISO7090-8
15	1	C0476206025-07	Galvanisch verzinkt, fleckbeschichtet	Zylinderschraube ISO4762-M6x25
16	1	1131000004	.	Triride Throttle
17	2	00000003189	.	iglidur G Kolbenring

alle sonstigen
Schrauben
mit SM sichern

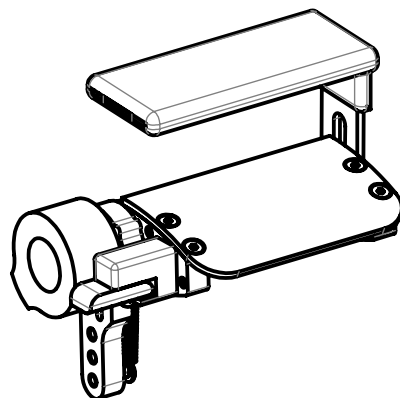

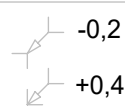Toleranzen ISO 2768-m		Werkstück- kanten ISO 13715		Oberflächenbehandlung		Oberfläche [mm²]		Gewicht [g] 792.67		Maßstab 1:2	
>0,5-6	±0,1					Werkstoff					
>6-30	±0,2			Datum		Name		Benennung			
>30-120	±0,3			bearb.		27.02.2020 CB/LK		Gasgriff			
>120-315	±0,5			gepr.		28.02.2020 ADi/LK		7130400100			
4	Vormontagehinweis hinzu.	08.01.25	CR/LK	 Reha Technik Im Hofstätt 11 D-72359 Dotternhausen Tel.: 07427/9480-0 Fax: 07427/948025		Zeichnungsnummer		Z 7130 400 100			
3	Neue Positionen	24.08.22	CB/LK								
2	Pos. 7 hinzugefügt	31.05.22	CB/LK								
1	Pos. 12 Art. Nr.	07.07.20	CB/LK								
Zust. Änderung		Datum		Name		P:\06 PR\06_04 PJ\130\400\		Ers. für		Ers. durch	BL. 1 / 1