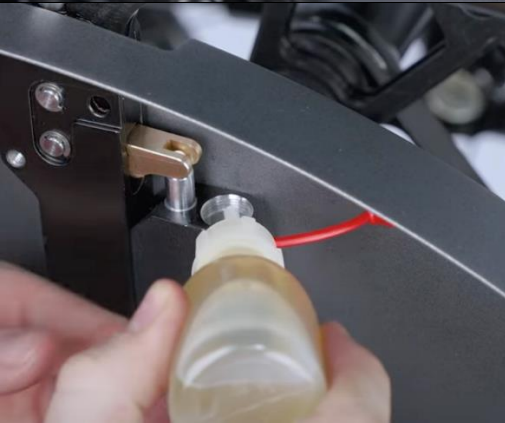


Arbeitsanweisung	E8060301006_MA_01_Nachfüllen_Zweifachauslösung_LIFT.docx
	Revision 00
	Blatt 1 von 4

Anleitung gültig für Korrektur Ölstand - LIFT-solid ab Baujahr 2007 - LIFT-activ	Service-Werkstatt Video auf Youtube https://youtu.be/NO9le29js58?si=eNYvZJoRp dKMleo  Scane den QR-Code um direkt zum Video zu kommen
	Benötigtes Werkzeug
	Öffnen der Gebereinheit
	Deckel und Druckfeder vorsichtig entfernen

Arbeitsanweisung	E8060301006_MA_01_Nachfüllen_Zweifachauslösung_LIFT.docx
	Revision 00
	Blatt 2 von 4

		Entnahme des Nachfüllkolbens mit der mitgelieferten Schraube
		Prüfen des Ölstands - Ölstand sichtbar am ende der halbrunden Nut = OK - Ölstand unterhalb dem ende der halbrunden Nut = nachfüllen
		Korrektur des Ölstands - Öl einfüllen bis Mitte der halbrunden Nut, lieber etwas zu viel, dies kann anschließend abgesaugt werden.
		- Kolben wieder in den Ausgleichsbehälter einsetzen und gegen den leichten Widerstand des überströmenden Öls so weit nach unten drücken, bis der Auslösewiderstand des Hubmechanismus fühlbar ist. - Dabei kann Öl aus der Bohrung nach oben über den Kolben fließen

Arbeitsanweisung	E8060301006_MA_01_Nachfüllen_Zweifachauslösung_LIFT.docx
	Revision 00
	Blatt 3 von 4

		- Die Schraube entfernen und mit der kleinen Spritze das Überschüssige Öl auf dem Kolben absaugen.
		- Die letzten Ölrreste auf dem Kolben kann man mit einem fusselfreien Tuch entfernen und abtrocknen.
		- Deckel mit Druckfeder wird wieder über dem Kolben in der Ausgleichsbehälter eingesetzt
		Schließen der Gebereinheit - Den Deckel einschrauben und Handfest anziehen

Arbeitsanweisung	E8060301006_MA_01_Nachfüllen_Zweifachauslösung_LIFT.docx
	Revision 00
	Blatt 4 von 4



Achtung:

- Ein zu starkes Festziehen des Deckels kann zu Gehäuseverzug führen wodurch sich der Betätigungskolben verklemmen kann!
- Fester Anziehen bringt nicht mehr Dichtigkeit, das macht der O-Ring

Abschluss der Montage